

LANÇAMENTO

BIOLÁGRIMA®



Solução 0,10% frasco 15 ml

"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Biolágrima[®]

Solução Lubrificante para todos os tipos de lentes de contato.

O QUE É?

Biolágrima são gotas umectantes e lubrificantes que proporcionam uma alta hidratação, melhorando assim o conforto visual e o uso das lentes de contato.

Modo de utilização

- Lavar as mãos com água e sabão antes de utilizar o produto.
- Aplicar uma ou duas gotas na parte interna da lente antes de colocar no olho.
- Usar **Biolágrima** quantas vezes forem necessárias.

Precauções

- Não deixar qualquer superfície entrar em contato com o bico gotejador do frasco para evitar contaminação.
- Não utilizar o produto por mais de 60 dias após a abertura do frasco, nem depois do prazo de validade.

INFORMAÇÕES

- Não utilizar o produto se o lacre de segurança estiver ausente ou quebrado. Fechar bem o frasco após cada utilização.
- Não ingerir a solução e manter fora do alcance das crianças.
- Não utilizar o produto em caso de alergia a algum dos seus componentes.
- Em caso de irritação ocular ou reação adversa, consultar um especialista.
- Antes de utilizar qualquer medicamento oftálmico, informe o seu médico de que é um usuário de lentes de contato.
- Conservar o produto à temperatura ambiente.

Composição do produto

Solução aquosa, isotônica e tamponada, com Hialuronato de Sódio 0,1%, Edetato Disódico 0,1% e Polihexanida 0,0001%.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- ✓ Alta hidratação ocular;
- ✓ Melhora e proporciona conforto visual, para uso de lentes de contato;
- ✓ Concentração 0,10% composta por **frasco de 15ml**, com o prazo de validade de **36 meses**.
- ✓ Fácil de aplicar.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Condições de armazenamento

Armazenar em temperatura entre 5 - 30°C.

ESTÉRIL. Esterilizado por método asséptico.

\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDAS!!!

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Ficha: BIOLÁGRIMA**Cód. do produto** 4416**OBS:** Lançamento!**Classe** SR**Denominação genérica** Hialunrato de sódio**Apresentação** 0,10% Solução para lente de contato frasco c/15 ml**Restrição de uso** -**Via de administração** Via ocular**Nº de MS** 8.010.251.182-8**Cód. de Barras** 7896112104162**Cód da Caixa de Embarque** N/A**Quant. de unidades por CE.** 56 unidades**Dimensões da CE.** 222x148x193 mm**Faca/Dimensões da Cartonagem** Comprimento x Largura x Altura: 36,00 x 30,00 x 85,00mm**Classe Terapêutica** Lubrificante ocular**Tipo de Tarja** Sem tarja

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%
Aliquotas	Preço Fábrica	R\$ 35,40	R\$ 37,53	R\$ 37,76	R\$ 37,99	R\$ 38,46	R\$ 38,94
	Preço Consumidor	-	-	-	-	-	-

Referência [Visalágrima - Vitamedic](#)**Composição**

Solução aquosa, isotônica e tamponada, com Hialuronato de Sódio 0,1%, Edetato Disódico 0,1% e Polihexanida 0,0001%.

Embalagem Primária Frasco plástico com 15mL**Classificação fiscal** 33079000**Lista PIS/Confins** M (12,50%)**IPI** 12%**Validade** 36 meses**Peso unitário** 0.030 kg**Peso por Cx. de Embarque** 1.68 kg

Sucesso e Boas Vendas!!!